


Accu-Chek® Mobile

Stripvrij, simpel, slim


Vier simpele aanwijzingen




1
Was uw handen met warm water en zeep voordat u begint. Spoel uw handen af en droog ze goed af met een schone handdoek.

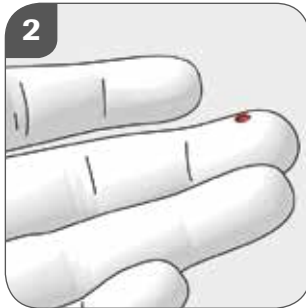

2
Gebruik altijd een kleine en goed gevormde bloeddruppel. Smeer de bloeddruppel niet uit.

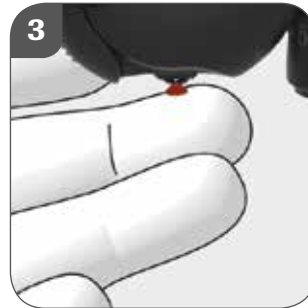

3
Breng de bloeddruppel voorzichtig aan in het midden van het testveld. Druk niet met uw vinger op het testveld.

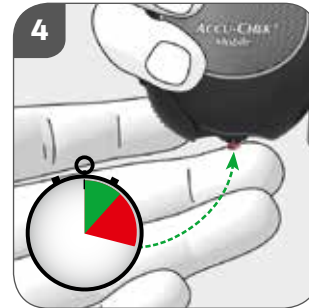

4
Breng de bloeddruppel direct na het prikken aan. Haal uw vinger van het testveld weg zodra het akoestische signaal klinkt en Meting loopt op de display wordt weergegeven.

Vier simpele stappen



1
Open het afdekkapje. De meter gaat aan.




2
Druk de prikken stevig tegen de zijkant van uw vingertop. Druk op de prikknop.



3
Breng de bloeddruppel aan in het midden van het testveld.



4
In ongeveer 5 seconden verschijnt het resultaat. Sluit het afdekkapje volledig. De meter gaat uit.

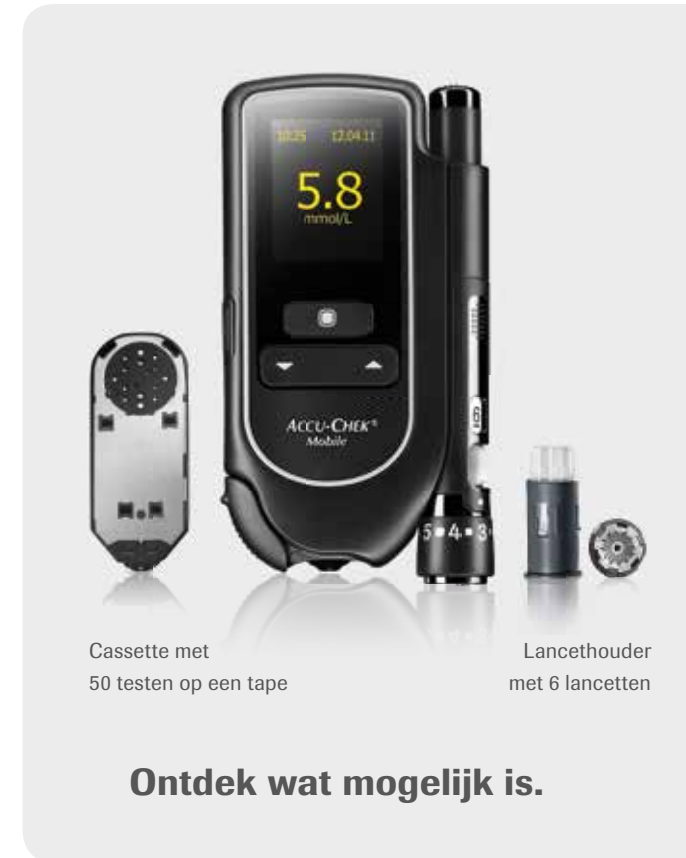

Cassette met 50 testen op een tape

Lancethouder met 6 lancetten

Ontdek wat mogelijk is.


Vervangen van de testcassette – na 50 testen




1 Open het afdekkapje. Schuif dit helemaal naar links tot de meter aan gaat.



2 Schuif de knop aan de zijkant naar boven om het cassettecompartiment te openen.

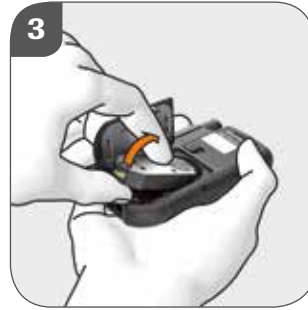

3 Verwijder de gebruikte cassette uit de meter.

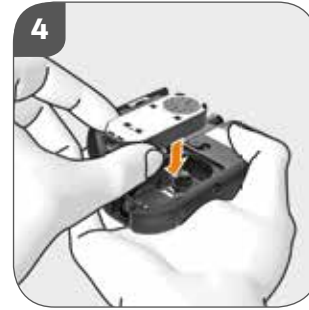

4 Plaats de nieuwe cassette in de meter. Sluit het cassettecompartiment en schuif het afdekkapje terug.



Bekijk ook de stap-voor-stap instructiefilm op www.mijnmeterinstructie.nl.

Vervangen van de lancethouder – na gebruik van 6 lancetten:



1 Haal het dopje van de prikpen. Verwijder de gebruikte lancethouder. De gebruikte lancethouder is voorzien van een rode streep en kan niet opnieuw gebruikt worden.



2 Vervang de lancethouder voor een nieuwe. Plaats het dopje terug op de prikpen.



3 Draai de instelling voor de juiste prikdiepte. Begin met een gemiddelde prikdiepte, bijvoorbeeld 3.



4 Zorg dat uw prikpen klaar is voor gebruik. Beweeg het hendeltje heen ① en weer ② voor een nieuw lancet.